


(*) Measurements taken at 23°C with deionised water.

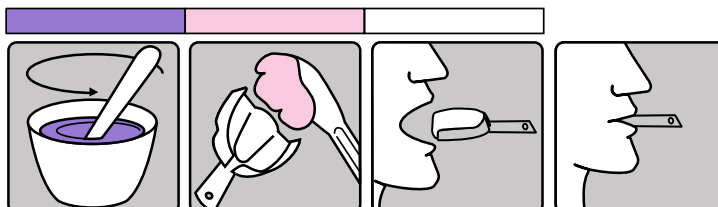

(*) mixing time 45"

(*) working time 1'45"

(*) initial setting time 1'55"

Only 30"
in mouth

Kromopan nie wymaga specjalnego przygotowania przed zastosowaniem. Materiał „Dust free”; zaleca się jednak ostrożność podczas otwierania saszetki i przesypywania proszku. Można stosować wodę z kranu; oznaczone czasy odnoszą się jednak dla mieszanki proszku z wodą dejonizowaną w temperaturze 23°C.

Proszek wymieszać energicznie z wodą. Stosując specjalne mieszadła mechaniczne do wyciskowych mas alginatowych, postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Uwzględnić chromatyczny wskaźnik fazy, który zapewnia idealne wymieszanie produktu i określa właściwy czas wprowadzenia do jamy ustnej.

Różnice temperatury i/lub twardości wody oraz energii wyrabiania masy powodują niewielkie zmiany czasu pracy i wstępnego czasu wiązania, które są automatycznie wskazywane kolorystycznie.

Umyć, wypluć, otrząsnąć wycisk z wody i odlać model. Model można odlewać nawet do 168 godzin z gwarancją doskonałych wyników. Wycisk przechowywać osobno, w zamkniętej plastikowej torebce. **Nie trzymać wycisku na powietrzu ani w wodzie.**

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym i chłodnym miejscu.

Doskonałe rezultaty zapewniają gipsy linii LASCOD:

Typ 3: Kromotypo 3; Singletypo 3.

Typ 4: Kromotypo 4; Singletypo 4; Ortotypo.